

Cosmopor® Advance

低敏親膚 快速導流 加倍吸收 服貼便利



產品規格

赫曼傷口敷料 (滅菌)

產品型號	產品規格
901010	7.2 X 5 cm
901013	10 X 8 cm

(請諮詢您的醫師關於本產品的使用方式)



常見問題

● Cosmopor® Advance 對傷口的好處？

與一般的島型敷料相較，有加倍的吸收力，無須頻繁換藥，也能有效控制滲液。傷口與皮膚服貼性佳，生活更便利。

● 何時需要更換 Cosmopor® Advance？

當白色的背層可見滲液顏色約1/2時，需要更換新的敷料。若滲液量較少，最長放置五天。

● Cosmopor® Advance、人工皮、OK繃的差別？

主要差異是吸收的滲液量，剛受傷的皮膚滲液量較多，建議可以使用Cosmopor® Advance控制滲液較乾爽舒適。較不需要頻繁換藥，也可以降低費用。

台灣赫曼有限公司

臺北市內湖區石潭路67號7樓

消費者服務專線：02-2790-7992分機13

使用前請詳閱說明書書語及注意事項

北市衛器廣字第 110070042 號

衛部醫器輸壹字第 017576 號

PHTW_WM_COSM_210514_01

線上
醫護



幫您解決傷口
照護困擾！



超強吸收 不沾黏傷口



醫療級低敏
全肌膚適用



Cosmopor® Advance

赫曼傷口敷料 (滅菌)

低敏親膚 快速導流 加倍吸收 服貼便利

HARTMANN

赫曼傷口敷料 (滅菌) 三層吸收科技

Cosmopor® Advance

低敏親膚 快速導流 加倍吸收 服貼便利



吸收層


強效鎖住滲液
不回滲，可緩衝傷口外壓力

導流層

快速導流滲液
不易造成傷口的浸潤

親膚層

柔軟服貼
不沾黏傷口，無痛更換

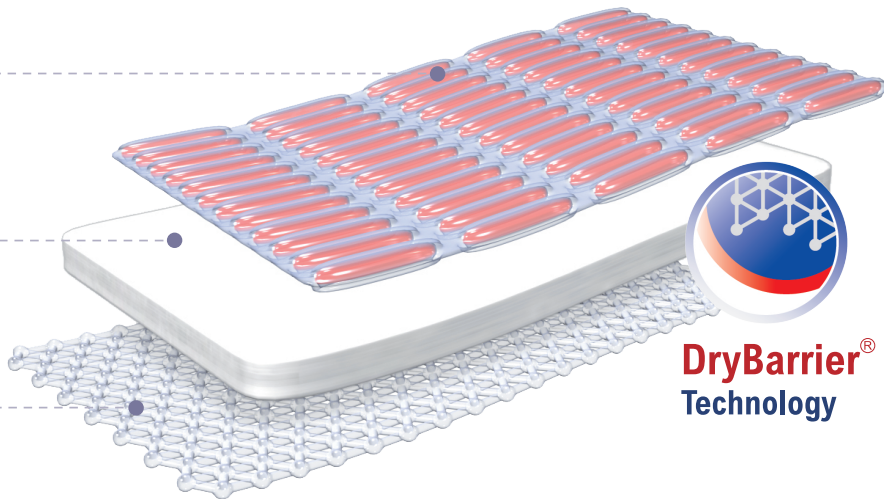


DryBarrier®
Technology

適用範圍

低至中度滲液傷口、撕裂傷、擦傷、割傷、術後傷口

使用方式

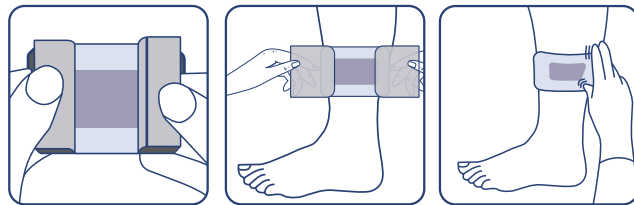

1. 將Cosmopor® Advance從包裝中取出，並撕去白色保護膜。
2. 將Cosmopor® Advance吸收層對準，再覆蓋於傷口。
3. 以手指輕壓敷料及黏邊。確保敷料能完全服貼傷口，達到保護及吸收滲液之功能。

注意事項：

- 本產品適用於低至中度滲液傷口。
- 敷料放置傷口最長時間為五天。
- 如患者對本產品中任何一種成分過敏，請立即停止使用。
- 請勿自行剪裁敷料。

加倍吸收
加速癒合



不沾黏
傷口



鎖住滲液
減少換藥

